


クリアフェイスガードフレーム CLEAR FACE GUARD FRAME



※製品改良のため予告なく形状、仕様を変更する場合がございます

クリアフェイスガード専用のフレーム


- ・「クリアフェイスガード」「クリアフェイスガードミニ」をマスク無しで装着可能
- ・フレームパーツは手洗い可能で繰り返し使用可能
(フィルムパーツは再利用しないでください)

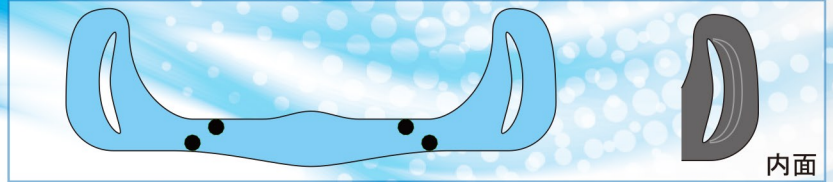

- ・耳掛け部分は、内面の指示線に沿ってカット出来るので、ご自身のお好みのサイズへ調整可能

カットせずに内側のラインで装着される方は、外側部分をカットして頂くとシルエットがきれいに見えます

- ・選べる2種類のフィルムパーツ

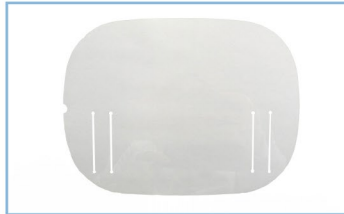

「クリアフェイスガード (別売)」




「クリアフェイスガードミニ (別売)」

息苦しさ軽減
通気性UP

くり返し使える
手洗い可能


ぴったりフィット
サイズ調整可能

装着方法

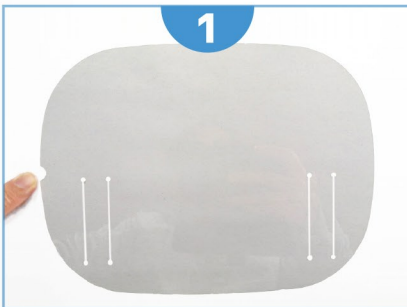

フィルム端部の半円状の切れ込みを左側に向けます
(顔に装着した際に切れ込みが左側にくるようにしてください)

※フィルムが裂けやすいので、強く引っ張り過ぎないようご注意ください
万一フィルムが裂けた場合は、テープなどで補修頂くと問題なく使用出来ます

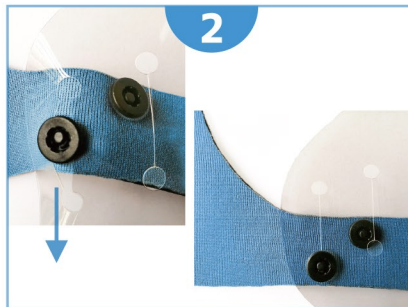

本体の留め具をフィルムスリット部分から通し、スライドさせ下側の穴に収まる様にして固定します (4カ所)



クリアフェイスガード
装着時



クリアフェイスガードミニ
装着時

フィルム及びフレームの位置を調整し、十分に口・鼻を覆うようにしてください

■サイズ (高さmm × 幅mm) **100x310**

■材質 本体: ポリエステル、合成ゴム
外装: ポリエチレン

MADE IN CHINA

製造・販売元

株式会社ビッグフロント

〒161-0034 東京都新宿区上落合1-27-6-203

TEL **03-5386-6397**

FAX 03-5386-6399 MAIL info@bigfront.co.jp

ご使用上の注意

- ・本製品の着用には、別売りの「クリアフェイスガード」「クリアフェイスガードミニ」が必要です (本製品単体でのご使用は出来ません)
- ・製品特有の匂いが気になる場合は、ご使用前に一度手洗いしてからご使用ください
- ・お手入れの際は、洗濯機・乾燥機・漂白剤の使用は厳禁です。水またはお湯でやさしくもみ洗いして、直射日光を避けて風通しの良い場所で乾燥させてください
- ・製品に折れスジやへこみが生じている場合がございますが、これは素材の特性から発生するものであり製品不良ではございません
- ・縫製品のため、サイズには多少の誤差が生じる場合がございます
- ・摩擦・水濡れ・汗等により色落ちや色移りすることがございます
- ・本製品は簡易的に防護するものであり、完全に防護するものではありません
- ・着用には際しては「装着方法」を参照の上、なるべく隙間を作らないよう着用してください
- ・フィルムの端部で、眼や皮膚を傷つけないように十分にご注意ください
- ・装着時に切れ込み部分を強い力で引っ張るとフィルムが裂けてしまう恐れがございます
- ・肌に異常を感じた場合はすぐにご使用をおやめください
- ・使用後は、各施設の取り決めに従い廃棄してください
- ・本製品は可燃性ですので、使用中火気には十分注意してください
- ・本製品は直射日光、高温、高湿度下の場所を避けてお子様の手の届かない所で保管してください