

クリアフェイスガード ミニ

CLEAR FACE GUARD MINI

クリアフェイスガードのミニサイズが新登場

(マスクには装着出来ません、装着には専用フレームが必要です)



表面に曇り止め加工
呼気による口元のくもりを防止

- ・専用フレーム（クリアフェイスガードフレーム）に装着することで、鼻・口を防護し、ご自身の飛沫拡散も防止します
- ・口元（表情）が見えるので、耳の不自由な方や、お子様とも安心してコミュニケーションがとれます

装着図



クリアフェイスガードフレームは別売です

※製品改良のため予告なく形状、仕様を変更する場合がございます

くもり止め

高透明


超軽量

飛沫拡散防止


装着方法



1
フィルム端部の半円状の切れ込みを左側に向けます
(顔に装着した際に切れ込みが左側にくるようにしてください)

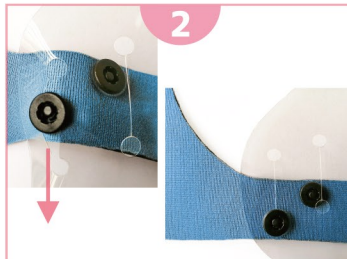

2
本体の留め具をフィルムスリット部分から通し、スライドさせ下側の穴に収まる様にして固定します（4カ所）

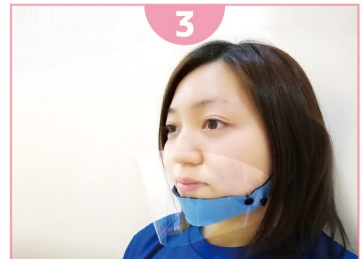

3
フィルム及びフレームの位置を調整し、十分に口・鼻を覆うようにしてください

※フィルムが裂けやすいので、強く引っ張り過ぎないようにご注意ください
万一フィルムが裂けた場合は、テープなどで補修頂くと問題なく使用出来ます

■サイズ (高さmm × 幅mm) **110x230**

■材質 本体：トリアセチルセルロース
外装：ポリエチレン

MADE IN JAPAN

製造・販売元

株式会社ビッグフロント

〒161-0034 東京都新宿区上落合1-27-6-203

TEL **03-5386-6397**

FAX 03-5386-6399 MAIL info@bigfront.co.jp

ご使用上の注意

- ・本製品の着用には、別売りの「クリアフェイスガードフレーム」が必要です（本製品単体でのご使用は出来ません）
- ・本製品は簡易的に防護するものであり、完全に防護するものではありません
- ・着用には際しては「装着方法」を参照の上、なるべく隙間を作らないよう着用してください
- ・フィルムの端部で、眼や皮膚を傷つけないように十分にご注意ください
- ・装着時に切れ込み部分を強い力で引っ張るとフィルムが裂けてしまう恐れがございます
- ・肌に異常を感じた場合はすぐにご使用をおやめください
- ・本製品は使い捨てですので再利用しないでください
- ・使用後は、各施設の取り決めに従い廃棄してください
- ・本製品の性質上、吸湿によりカールが発生することがありますが、性能に問題はございません
- ・本製品は可燃性ですので、使用中火気には十分注意してください
- ・本製品は直射日光、高温、高湿度下の場所を避けてお子様の手が届かない所で保管してください