


アクティブクリアマスク ACTIVE CLEAR MASK



スポーツなどのアクティブなシーンでも使用できる
表情を隠さずにコミュニケーションを取れる透明マスク

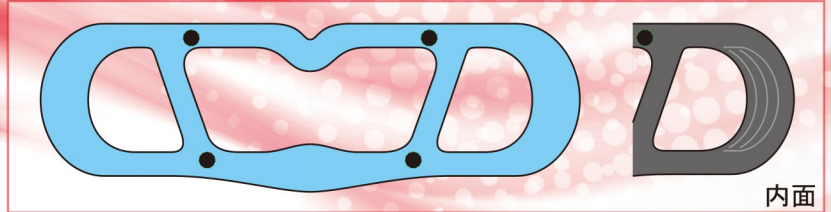

- ・耳掛け部分は、内面の指示線に沿ってカット出来るので、ご自身のお好みのサイズへ調整可能
カットせずに内側のラインで装着される方は、外側部分をカットして頂くとシルエットがきれいに見えます
- ・シーンにあわせて選べる2種類のフィルムパーツ



- 「ハードフィルム」
くもり止め加工あり
口元をしっかりと見せるモデル
- 「ソフトフィルム」
くもり止め加工なし
安全性を考慮したモデル

※製品改良のため予告なく形状、仕様を変更する場合がございます

飛沫拡散防止

息苦しさ軽減
通気性UP


スポーツ
アウトドア

くり返し使える
手洗い可能

装着方法



1
フィルム端部の半円状の切れ込みを
左下側に向けます
(顔に装着した際に切れ込みが左下側に
くるようにしてください)

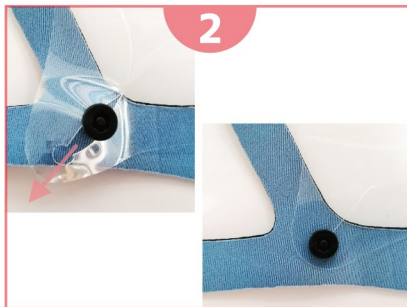

2
本体の留め具をフィルムスリット部分
から通し、スライドさせ四方の穴に
収まる様にして固定します (4カ所)



3
フィルム及びマスクの位置を調整し、
十分に口・鼻を覆うようにしてください

■サイズ (高さmm × 幅mm) 106x340

■材質 本体: ポリエステル、合成ゴム
外装: ポリエチレン

MADE IN CHINA

製造・販売元

株式会社ビッグフロント

〒161-0034 東京都新宿区上落合1-27-6-203

TEL 03-5386-6397

FAX 03-5386-6399 MAIL info@bigfront.co.jp

ご使用上の注意

- ・製品特有の匂いが気になる場合は、ご使用前に一度手洗いしてからご使用ください
- ・お手入れの際は、洗濯機・乾燥機・漂白剤の使用は厳禁です。
水またはお湯でやさしくもみ洗いして、直射日光を避けて風通しの良い場所で乾燥させてください
- ・製品に折れスジやへこみが生じている場合がございますが、これは素材の特性から発生するものであり製品不良ではございません
- ・縫製品のため、サイズには多少の誤差が生じる場合がございます
- ・摩擦・水濡れ・汗等により色落ちや色移りすることがございます
- ・本製品は簡易的に防護するものであり、完全に防護するものではありません
- ・万一、フィルムに亀裂などが入った場合は絶対に使用しないで下さい (怪我の原因となる恐れがございます)
- ・スポーツのプレー時や人と接触する可能性のある場合は「ソフトタイプ」をご使用ください
- ・「ハードタイプ」のフィルムは絶対に使用しないで下さい
- ・着用には際しては「装着方法」を参照の上、なるべく隙間を作らないよう着用してください
- ・フィルムの端部で、眼や皮膚を傷つけないように十分にご注意ください
- ・フィルムパーツを再利用する際は、十分なアルコール清拭で消毒してください
- ・肌に異常を感じた場合はすぐにご使用をおやめください
- ・使用後は、各施設の取り決めに従い廃棄してください
- ・本製品は可燃性ですので、使用中火気には十分注意してください
- ・本製品は直射日光、高温、高湿度下の場所を避けてお子様の手の届かない所で保管してください